

# EXPERT Progressive

*Novo progresivno  
kontaktno sočivo!*

Predstavljamo novo GP progresivno  
kontaktno sočivo koje pruža odličan  
vid na svim udaljenostima

 ORTOLENS

  
Precilens

Boston®  
Materials


Unapređena oštrina vida kod presbiopije

## SAVETI ZA FITOVANJE

### PREGLED PRE FITOVANJA

- Refrakcija za daljinu i blizinu
- Keratometrija ili topografija
- Biometrija


Jedinstveni multifokalni dizajn:  
**EXPERT Progressive**

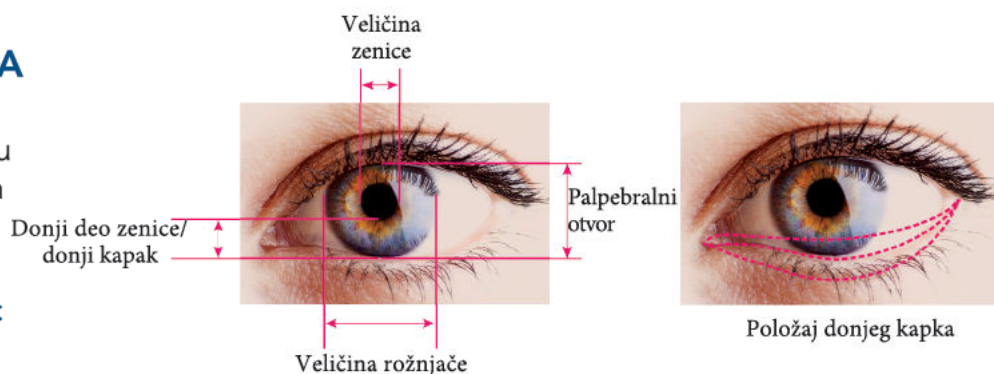


Kornealni cilindar (mm)	Prečnik (mm)	Bazna krivina (mm)	Jačina za daljinu	Adicija
<0.30	9.50	Km+0.05	Refrakcija za daljinu - Jačina suznog filma	Adicija kao na naočarima
0.30 do 0.50	9.00	Km		
>0.50	9.50	Izračunati uz pomoć proizvođača		

### PROCENA FITA EXPERT PROGRESSIVE SOČIVA

- Vid na daljinu: oštrina vida monokularno/binokularno
- Vid na blizinu: oštrina vida binokularno sa normalnim osvetljenjem
- Kontrola vida na srednjim rastojanjima: u uslovima u kojima pacijent uobičajno nosi sočiva, podignute i spuštene brade.
- Pregled na špalt lampi sa belim osvetljenjem:
  - Položaj sočiva: inferiorno, na donjem kapku
  - Položaj tački za orijentaciju: u donjoj trećini zenice
  - Pokretljivost sočiva: brzi ograničeni pokreti
  - Translacija za vid na blizinu: gornja ivica sočiva u nivou gornjeg limbusa
- Floresceinski test: blago naglašeni rezervoar fluoresceina kada je sočivo u donjoj poziciji

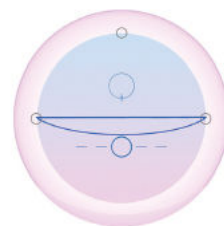

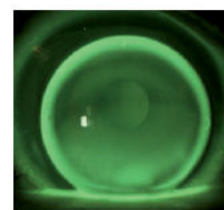



Translacija za vid na blizinu



Opseg	Prečnik	Bazna krivina	Jačina	Adicija
	8.50 do 10.50 korak 0.50	7.20 do 8.60 korak 0.05	-15.00 do +10.00 korak 0.25	+1.00 do +3.50 korak 0.25
Materijal	Boston EO®, Boston XO®			



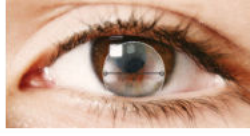

## Optimizacija vida na daljinu:

- Dokorekcija probnim staklima
- Položaj tačaka za orijentaciju

			Uraditi sledeće:
Ako su tačke za orijentaciju u gornjih 2/3 zenice i sočivo	je pozicionirano visoko		smanjiti prečnik
	se oslanja na donji kapak		smanjiti visinu segmenta
Ako su tačke za orijentaciju ispod nivoa zenice i sočivo	sklizne ispod donjeg kapka		povećati prečnik
	se oslanja na donji kapak ispod granice limbusa		povećati prečnik
Ako je pokretljivost sočiva prevelika			smanjiti prečnik

## Optimizacija vida na blizinu i srednja rastojanja:

- Dokorekcija probnim staklima
- Kontrola translacije sočiva pri pogledu na dole (vid na blizinu)

			Uraditi sledeće:
Ako postoji adekvatna translacija i	položaj tačaka za orijentaciju je dobar		koristiti rezultat dobijen dokorekcijom
Ako je translacija loša i	sočivo sklizne ispod donjeg kapka pri pogledu dole		povećati prečnik i/ili baznu krivinu
Ako postoji dobra translacija i tačke za orijentaciju su ispod zenice pri pogledu pravo i	donji kapak je ispod limbusa		povećati prečnik
	sočivo ima dobar položaj pri pogledu pravo		povećati prečnik


 ORTOLENS

  
Precilens

Boston®  
Materials

## JEDINSTVENE PERFORMANSE OŠTRINE VIDA

Pružuje jednako kvalitetan vid na srednjim rastojanjima kao progresivna stakla za naočare bez ugrožavanja vida na blizinu i daljinu.

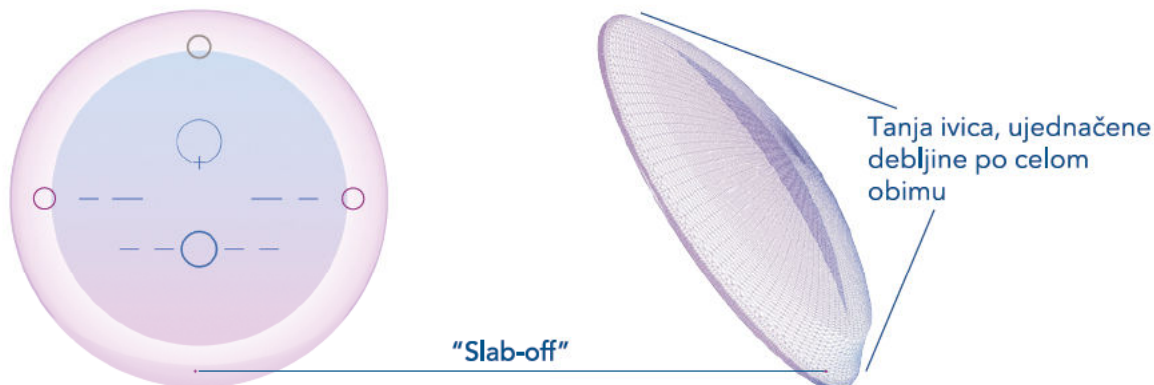

	EXPERT Progressive
<b>Bazna krivina</b>	7.20mm do 8.60mm korak 0.05mm
<b>Prečnik</b>	8.50mm do 10.00mm korak 0.50mm
<b>Jačina</b>	-15.00D do +10.00D korak 0.25D
<b>Adicija</b>	+1.00D do +3.50D korak 0.25D

EXPERT Progressive je segmentni translirajući multifokalni dizajn gp kontaktnih sočiva. Kada pacijent gleda pravo napred tokom aktivnosti za koje je potreban vid na daljinu, sočivo se oslanja na donji kapak i pacijent gleda kroz deo sočiva za vid na daljinu (gornji deo sočiva). Kada pacijent spusti pogled da bi čitao, donji kapak će zadržati sočivo na istom mestu dok će linija pogleda, odnosno zenica skliznuti u oblast za vid na blizinu (donji deo sočiva). Između ove dve oblasti nalazi se progresivna prelazna zona.

### KOMENTARI EKSPERATA

**Catherine Peyre, MD**  
*"EXPERT Progressive predstavlja pravi napredak u oblasti multifokalnih kontaktnih sočiva. Progresija jačine je blaga, uključujući i srednju prelaznu zonu. Nema naglog prelaza u vidnom polju, čak ni za veće adicije. Zahvaljujući Slab-off tehnologiji na donjoj ivici, udobnost na oku je jednaka kao kod koncentričnih multifokalnih sočiva."*

**Brooke Messer, OD, SLS:**  
*"Ovo novo sočivo je lako za fitovanje i pruža pacijentima široko polje i za vid na blizinu i za vid na daljinu. Dobro je dizajnirano pa pruža odličan vid na srednjim rastojanjima. Moji pacijenti sa presbiopijom su oduševljeni rezultatima."*