

Bausch & Lomb Boston ADVANCE™ раствор за чишћење

Овај додатак садржи важне информације. Молимо вас да га прочитате пажљиво и сачувате за неку будућу употребу.

Посебно формулисан за флуоросиликонакрилатна и силиконакрилатна гаспропустљива контактна сочива.

BAUSCH & LOMB BOSTON™ ADVANCE раствор за чишћење

Свакодневно употреба овог производа спречиће накупљање наслага које се тешко отклањају и које смањују удобност ношења гаспропустљивих контактних сочива.

• Посебно формулисан за употребу са Bausch & Lomb Boston ADVANCE Comfort Formula раствором за чување.

САСТАВ:

Активна компонента: површински активан алкилетарсулфат (80теж/вол %)

Остали састојци: натријум-хлорид, натријум-фосфат, нејонски површински активан алкохол, суспензија силика гела са титан-диоксидом.

УПУТСТВО:

1. Пре него што приступите руковању сочивима, оперите руке.

2. На длану руке, лагано трљати свако сочиво на обема странама са неколико капи Bausch & Lomb BOSTON Advance™ раствора за чишћење у току од 20 секунди.

3. УКЛОНИТИ РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ ДЕТАЉНИМ ИСПИРАЊЕМ ПО УПУТСТВУ ВАШЕГ ОЧНОГ ЛЕКАРА.

4. Ставити сочиво у касету за чување и прелити свако сочиво свежим раствором за чување. Сочива оставити потопљена најмање 4сата (или преко ноћи) пре ношења.

АКО РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ СЛУЧАЈНО ДОСПЕ У ОКО, УКЛОНИТЕ СОЧИВА И ОДМАХ ИСПЕРИТЕ ОКО ТЕКУЋОМ ВОДОМ ИЗ ЧЕСМЕ ДОК ПОТПУНО НЕ УКЛОНИТЕ РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ

Упозорења:

• Овај се раствор никада несме поново употребити.

• УВЕК ПОТАПАЈТЕ СОЧИВА У РАСТВОР ЗА ЧУВАЊЕ. НИКАДА НЕ ПОТАПАЈТЕ СОЧИВА У РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ. УВЕК ИСПЕРИТЕ СОЧИВА ДЕТАЉНО (ПО УПУТСТВУ ВАШЕГ ОЧНОГ ЛЕКАРА) ПОСЛЕ ЧИШЋЕЊА РАСТВОРОМ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПРЕ ПОТАПАЊА У РАСТВОР ЗА ЧУВАЊЕ.

• Врх капаљке бочице никада несме да додирне ни једну површину, јер то може

довести до загађивања раствора бактеријама.

- Бочицу држати чврсто затворену када се не употребљава
- Увек оперите и исперите руке пре руковања сочивима
- Увек детаљно очистити касету за чување сочива, детаљно испрати и осушити на ваздуху
- Употребити пре истека рока трајања означеног на кутији.

Опрез:

ОВАЈ РАСТВОР СЕ НЕ СМЕ СТАВЉАТИ ДИРЕКТНО У ОКО

Држати ван домашаја деце.

Не користити по истеку рока трајања.

Не користити ако сигурносни затварач на бочици недостаје или је оштећен.

Не користити ако сте алергични на било коју компоненту овог производа.

Одбацити преостали раствор 3 месеца након првог отварања.

НЕ СМЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА МЕКА КОНТАКТНА СОЧИВА.

STERILE A

CE 0050



Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Made in Italy

Distributor: Optinova d.o.o. Gundulićeva 57, 10000 Zagreb, Hrvatska



Увозник и дистрибутер за Србију:
Ортоленс д.о.о, Влајкова 199, Лесковац

Дистрибутер в России: Доктор Линз, Москва

BOSTON i BOSTON ADVANCE su zaštićene oznake Bausch & Lomb Incorporated.
BOSTON и BOSTON ADVANCE су заштићени знакови Bausch & Lomb Incorporated.
БОСТОН и БОСТОН АДВАНС – торговые марки Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.